

## FICHE MEMO CRYOPROTEINES

# Cryoglobuline / Cryofibrinogène = toujours à 37°C

prélever du lundi au vendredi matin (jours ouvrés): pour enlèvement avant 11H\*

~~TAL~~  
~~Urgence~~

\*Dernier enlèvement par les pédestres avant 11h

Analyse à **programmer**, impératifs à respecter

1 Patient à jeun

+

2 Tubes sang et aiguilles préchauffés à 37°C (au moins 15 min)

Cryoglobuline:  
2 tubes secs 7 mL



Cryofibrinogène:  
2 tubes secs 7 mL +  
2 tubes citratés 5 mL



thermobloc  
à demeure



valisette du laboratoire

vue  
intérieure



Tubes à replacer immédiatement  
à 37°C après le prélèvement

+

3 Fiche de traçabilité acheminement du prélèvement remplie

à réserver la veille au **35 588**  
demander l' enlèvement au **35 588**

1 + 2 + 3 → **Prélèvement conforme**