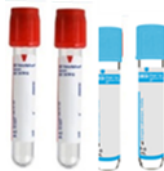


FICHE MEMO CRYOPROTEINES

Cryoglobuline / Cryofibrinogène = toujours à 37°C**Valisette à réserver la veille au 35 588****Prélever du lundi au vendredi (jours ouvrés) entre 7 et 15H**~~TAL~~~~Urgence~~Enlèvement par les pédestres **entre 8H et 15H**Analyse à **programmer**, impératifs à respecter:**1 Patient à jeun**

+

2 Tubes sang et aiguilles préchauffés à 37°C (au moins 15 min) en valisette dédiée**Cryoglobuline:**
2 tubes secs 7 mL**Cryofibrinogène:**
2 tubes secs 7 mL +
2 tubes citratés 5 mLvue
intérieure →

valisette du laboratoire

**demander l'enlèvement au 35 588
entre 8H et 15H****Tubes à remplacer immédiatement à 37°C après le prélèvement****3 Fiche de traçabilité acheminement du prélèvement remplie****1 + 2 + 3 → Prélèvement conforme**